

2021 年 6 月 17 日

AED 設置管理者・AED 購入者 各位

一般社団法人 電子情報技術産業協会  
ヘルスケアインダストリー部会  
ME 市販後規制専門委員会  
体外式除細動器 WG

自動体外式除細動器（AED）を屋外に設置する場合の管理等についてのお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の諸事業に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

AED の市民使用が認められ 18 年目となり、AED の普及に伴う利便性の向上・使用時間帯の拡大・幅広い設置場所を目的とした購入者の要望が多様化してまいりました。

屋外への設置に向けては、極端な温度変化が想定される状況や、厚生労働省通知「寒冷な環境下における自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等について」（薬食安発 1218 第 1 号）を踏まえ、この度、下記の通り、AED の管理等についてお知らせしますので、AED 設置管理者および AED 購入者の方々におかれましては、ご確認の上、ご対応下さいますようお願い申し上げます。

なお、これを機に AED の日常点検の重要性を再確認いただき、消耗品（バッテリー、電極パッド等）の適切な管理も引き続きお願い致します。

敬具

記

<AED の管理等について>

AED には製品毎に動作保証条件が定められており、その条件外において動作は保証されておられません。

特に気温が氷点下の寒冷な環境下や、直射日光による極端な高温化においては、AED が正常に動作しない可能性があります。

つきましては、AED を屋外に設置する場合は、温度管理等が可能で、風雨や紫外線による外観の劣化に強い屋外型 AED 収納ボックス等を使用していただき、AED を設置している場所の気温が、お使いの AED が保証する動作温度範囲である事をご確認いただき、日頃より適切に管理していただきますよう、お願い致します。

尚、屋外型 AED 収納ボックスは、設置場所や温度環境により、機能・性能が異なりますので、製造元や販売店にご相談いただき、適した収納ボックスをご選択くださいますようお願い致します。

\* 製品の動作保証条件は、取扱説明書および添付文書に記載されております。

ご不明点がございましたら、製造販売業者又は、販売店にお問い合わせ下さい。

<JEITA 体外式除細動器 WG 参加企業>

旭化成ゾールメディカル株式会社  
オムロンヘルスケア株式会社  
株式会社 CU  
日本光電工業株式会社  
日本ストライカー株式会社  
日本ライフライン株式会社  
株式会社フィリップス・ジャパン  
フクダ電子株式会社

以上